

DEXSUI

Periüretal Enjeksiyon Tedavisi



"Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde Cerrahisiz Çözüm"

Kaçırmaya SON!!!

"Güvenle Gülümseyin, Hayata Kaçırmadan Devam Edin!"



BIOMICRO[®]
İLAÇ - MEDİKAL - TIBBİ CİHAZ

New generation injection implant



Üretra enjeksiyonu,
idrar kaçırma (SUI) tedavisinde kullanışlı minimal invaziv bir yöntemdir.

Hacim arttırıcı ajanlar, hastanın ameliyata kıyasla hemen aktif hayata dönmesine imkan sağlar. Prosedürel bir seçenek isteyen ancak başka tıbbi sorunlar nedeniyle minimal invazif bir cerrahi prosedürünü tolere edemeyen, stres inkontinansı olan kadınlar için bu yararlı bir yönetim seçeneğidir.

Dexsui enjeksiyonu artan doku hacmi yaratarak mesanenin doldurulması ve kasılması sırasında distal üreterin koapatasyonunu sağlar. Dekstranomer mikroküreleri yavaş yavaş konakçı bağ dokusuyla çevrelenir


DEXSUI, 80 -250 mikron aralığında dekstranomer mikroküreler ve hayvansal bazlı olmayan çapraz bağlı hiyalüronik asit içeren steril, viskoz bir jeldir. DEXSUI biyoyumlu ve biyobozunurdur

Periüretal enjeksiyon, cerrahi açıdan yüksek riskli olan hastalarda, ileride çocuk sahibi olmayı planlayan hastalarda ve uygulanan bir anti-inkontinans cerrahisine rağmen, hafif dereceli stres idrar kaçırması devam eden hastalarda, kısa etki süresine rağmen stres inkontinans tedavisinde uygun bir tedavi seçeneğidir


Çapraz bağlı hiyalüronik asit, temel dekstranomer mikropartikülleri taşıyıcı görev ifa eder. Dextronomer mikropartiküller, enjekte edilen bölgedeki bağ dokusu üzerinde hacim oluşturur.

Kullanım Şekli

- 1 -Üretral uzunluğun kateter ile ölçülmesi
- 2 -Üretranın uzunluğunun kateter üzerinde işaretlenmesi
- 3 -İşaretin aplikatör üzerinde ilgili bölgeye kopyalanması

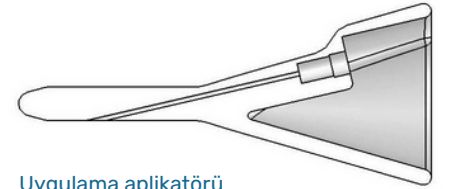

Uygulama aplikatörü

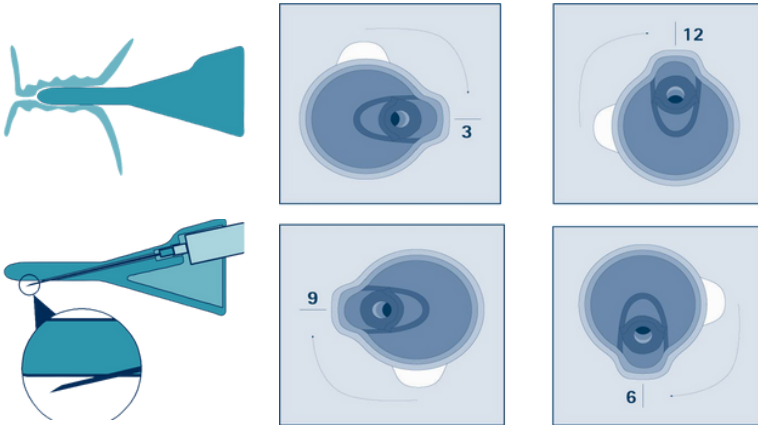

BiOMICRO®
İLAÇ - MEDİKAL - TIBBİ CİHAZ



Uygulamayı izlemek için
Qr Kodu Okutunuz

www.biomicro.com.tr

Adres : Adalet, Manas Blv. Folkart Towers No. 47 B İç Kapı No.
2601, 35530 Bayraklı/İzmir

info@biomicro.com.tr

0 232 218 24 09